

Brenntabelle ICE Keramik

Washbrand Einzelkappchen:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	5 min
Endtemperatur	920° C
Haltezeit bei Endtemperatur	2 min
Steigetemperatur	55° C/min
Abkühlzeit	1 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus

Washbrand kleine Brücke:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	7 min
Endtemperatur	920° C
Haltezeit bei Endtemperatur	2 min
Steigetemperatur	40° C/min
Abkühlzeit	2 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus

Washbrand große Brücke:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	7 min
Endtemperatur	920° C
Haltezeit bei Endtemperatur	2 min
Steigetemperatur	30° C/min
Abkühlzeit	3 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus

Korrekturbrand vor dem Verblenden:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	5 min
Endtemperatur	840° C
Haltezeit bei Endtemperatur	1 min
Steigetemperatur	40° C/min
Abkühlzeit	2 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus

2. Brand und Glasurbrand Einzelkappchen:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	5 min
Endtemperatur	820° C
Haltezeit bei Endtemperatur	2 min
Steigetemperatur	55° C/min
Abkühlzeit	1 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus

2. Brand und Glasurbrand kleine Brücke:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	5 min
Endtemperatur	820° C
Haltezeit bei Endtemperatur	2 min
Steigetemperatur	40° C/min
Abkühlzeit	2 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus

2. Brand und Glasurbrand große Brücke:

Start Temperatur	350° C
Vortrockenzeit	7 min
Endtemperatur	820° C
Haltezeit bei Endtemperatur	2 min
Steigetemperatur	30° C/min
Abkühlzeit	3 min
Vakuum	Während des gesamten Brennzyklus