


Instrucciones para la cocción y el enfriamiento de estructuras de zirconia en la estratificación de cerámica

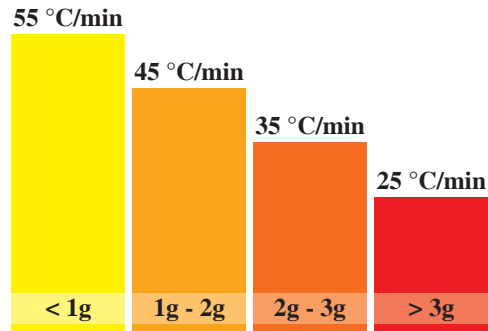

Peso por unidad dental *

* La unidad dental con la masa más alta determina los tiempos para el trabajo entero.

A causa de la mala conducción térmica del óxido de zirconio, las estructuras manufacturadas con el mismo no deben ser calentadas o enfriadas demasiado rápido. Eso puede causar fisuras en las estructuras. La siguiente tabla indica las velocidades de calentamiento y de enfriamiento aconsejadas según la masa de la estructura.