

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU

„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger

Il Prettau bridge avvitato su due barre


Un posizionamento scorretto degli impianti provoca la fuoriuscita del raccordo a vite sulle superfici labiali degli incisivi. Per evitare ciò, abbiamo deciso di utilizzare la parte primaria di due barre avvitata alla parte secondaria del Prettau bridge. Il raccordo a vite è stato realizzato con il sistema Screw-Tec: nella parte primaria si taglia una filettatura nel grezzo presinterizzato dove si avvita e si incolla una cannula con filettatura interna ed esterna dopo la sinterizzazione. La parte secondaria è fissata con quattro viti alle cannule sulla barra. In tal modo era possibile spostare il raccordo a vite nelle regioni palatali e ricoprire in modo estetico la regione vestibolare. Per garantire la massima pulizia, abbiamo realizzato le superfici gengivali in forma convessa, lucidandole poi con gommini lucidanti per zirconia.



Il Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center

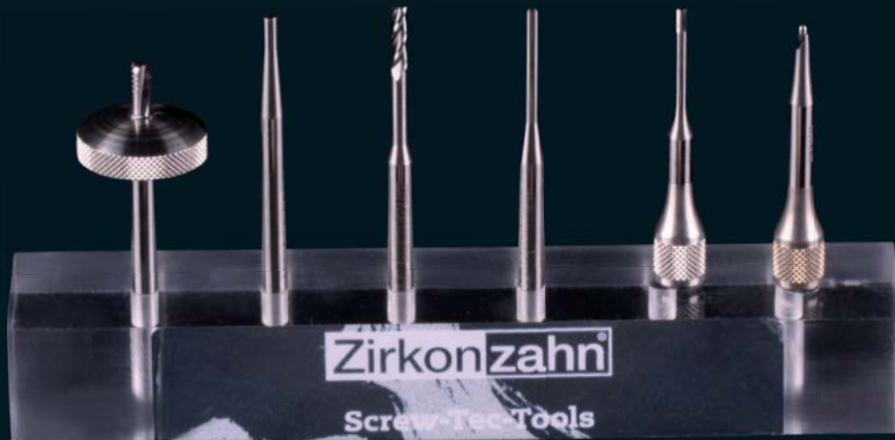

Zirkonzahn®

Gommini lucidanti: non vi è conflitto tra velocità e precisione

I nuovi gommini lucidanti per zirconia della Zirkonzahn permettono una lavorazione rapida, sicura e a basso sviluppo di calore, senza per altro compromettere la precisione. La versione blu è soprattutto adatta alla finitura abrasiva delle zone marginali relative alle strutture o delle zone che devono essere ancora leggermente asportate. I lucidanti rosa sono ideali per la lucidatura principale, mentre la lucentezza si ottiene con il lucidante grigio. Questo nuovo prodotto si distingue inoltre per la sua stabilità particolarmente elevata.



Questa barra è stata lucidata con i nostri nuovi gommini lucidanti per zirconia.

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Pieno di sogni e forza infinita

