

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




100% ZIRCONIA PRETTAU

Una protesi inferiore amovibile con garanzia di lunga durata

L'idea consiste nel realizzare una protesi inferiore amovibile, sostenuta da barrette di connessione, con un materiale di ceramica al 100%. Si utilizzano barrette di connessione di zirconia alle cui estremità è fissata una barra d'ancoraggio per ricevere una guida in resina. La frizione che deriva dall'applicazione della guida in resina sostiene la protesi sulla barretta di connessione ed è, inoltre, intercambiabile. In tal modo è garantita la ritenzione della protesi.


Le barrette di connessione sono fresate da una struttura in resina (Frame), interamente anatomica, per garantire un posizionamento perfetto della barretta di connessione nell'ambito del restauro. L'intera protesi, compreso le barrette di connessione, è di zirconia al 100%. Soltanto la gengiva di color rosa è creata per mezzo di una faccetta in ceramica. Si ottiene un Prettau bridge, ossia una protesi inferiore amovibile ritenuta da barrette di connessione ed attacchi intercambiabili nel tempo.

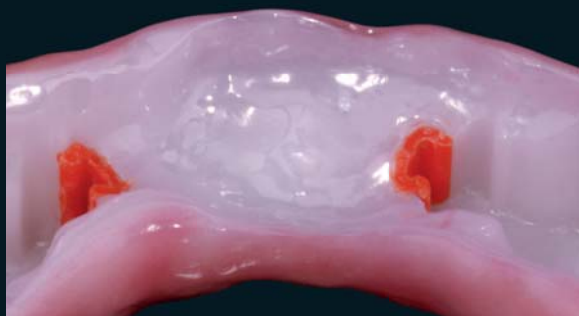


Il Prettau Bridge

Georg Walcher, Zirkozahn Italia

Dr. Nico Bühler – Clinica di odontoiatria ricostruttiva dell'Università di Basilea

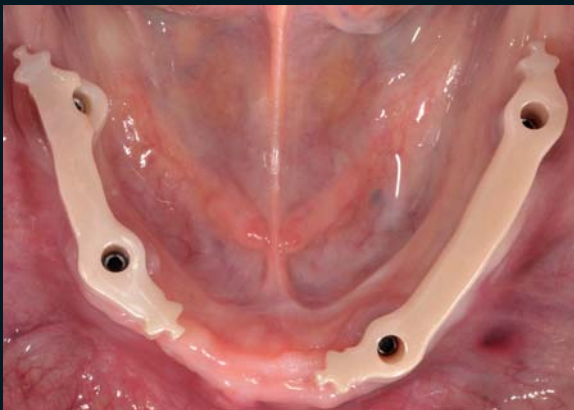

Zirkonzahn®

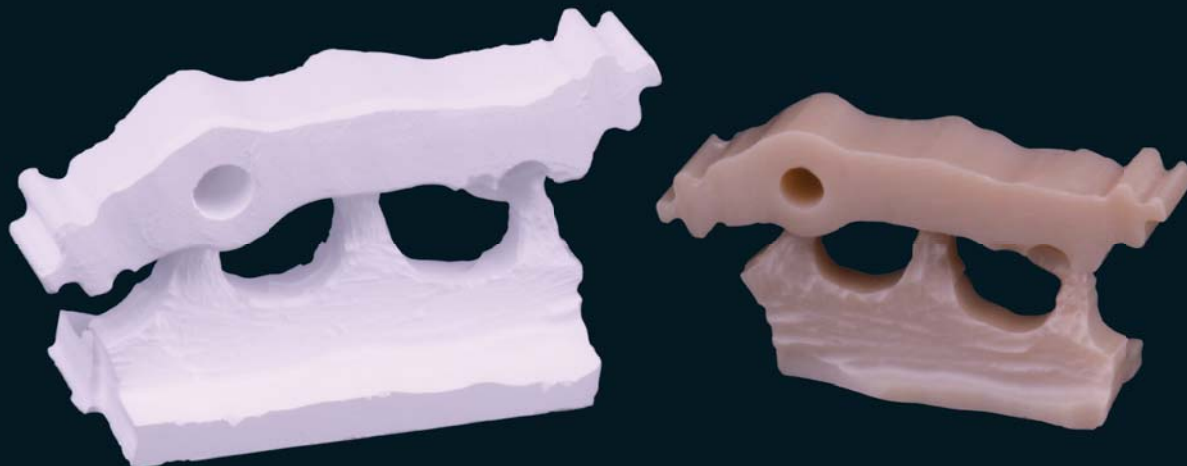

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



fresato con il sistema Zirkonzahn



WEAA5809=