


## Istruzioni per la cottura di strutture in ossido di zirconio durante il rivestimento in ceramica

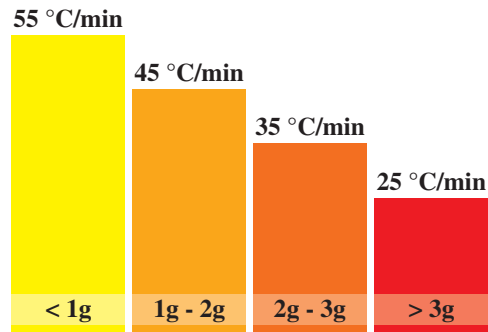

**Peso per unità \***

\* Il dente con la massa più elevata determina l'intero tempo di lavoro

A causa della scarsa conducibilità termica dell'ossido di zirconio, le strutture preparate, con questo materiale, non devono essere riscaldate o raffreddate troppo veloce, si potrebbe incorrere in possibili lesioni nella struttura. La seguente tabella indica la velocità di riscaldamento e di raffreddamento consigliata secondo la massa della struttura.