

## Anleitung


### Einfärben von Zirkon mit Colour Liquid Prettau® Aquarell




*eingefärbte Arbeit  
vor dem Sintern*

Die Colour Liquid Prettau® Aquarell Farben entsprechen grundsätzlich dem 16-V-Farbspektrum und sind säurefrei auf Wasserbasis hergestellt. Die neuen Colour Liquid Prettau® Aquarell Farben wurden zusätzlich mit speziellen ausbrennbaren Bio-Pigmenten als Orientierungshilfe versehen, damit jeder einzelne Pinselstrich vor dem Dichtsintern sichtbar und nachvollziehbar ist. Insbesondere die individuelle Farbgestaltung der Details wie z. B. der Mamelons sowie der Zervikal- oder Interdentalbereiche kann nun höchst akzentuiert und präzise

durchgeführt werden. Während des Sinterns werden die Bio-Pigmente zu 100% ausgebrannt und die Restauration erscheint besonders gut in der gewünschten Zahnfarbe. Die Anwendung der Cervical- und Intensivfarbtöne verleiht der Arbeit mehr Virtuosität. Gemeinsam mit den neuen Prettau® Aquarell Einfärbeflüssigkeiten wurde eine vereinfachte Pinseltechnik zum säurefreien Einfärben des Prettau® Grünzirkons entwickelt.

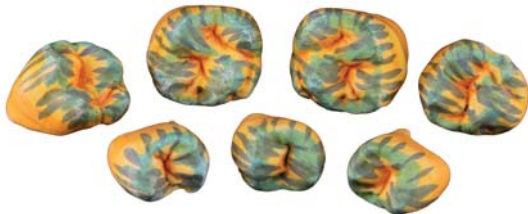

*fertig eingefärbt, vor dem Sintern*

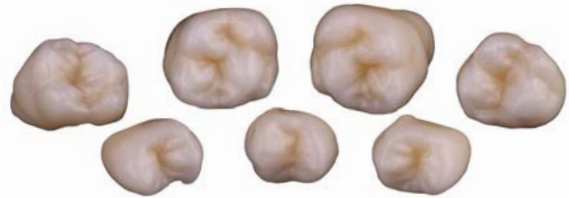

*nach dem Sintern*

#### Benötigte Utensilien



Colour Liquid Prettau® Aquarell



metallfreier Pinsel zum Auftragen der Liquids



Papierserviette zum Abtrocknen des Pinsels



Trockenlampe



Sinterofen

#### Hinweise zu Aufbewahrung und Anwendung

Einfärbeflüssigkeiten im Dunkeln und kühl lagern; für ein homogenes Farbergebnis bitte vor Gebrauch gut schütteln. Vor dem Bemalen der Rohlinge, Pinsel immer vollständig in die Liquids eintauchen und überschüssige Tropfen am Rand leicht abstreifen. Bei Farbwechsel Pinsel vorher mit Wasser gründlich reinigen.



## Anleitung zum Einfärben eines Frontzahns

Ausgangssituation: gefräster Zahn



Schritt	Colour Liquid	Farbauftrag	labial	palatinal
1	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x		
4	<b>Cervical A</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
5	<b>Incisal blue</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	<b>Incisal grey</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	<b>Incisal violet</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	<b>Orange 1</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	<b>Brown 2</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

**Trocknen:** Nach dem Einfärbeprozess werden die Arbeiten mit der Kaufläche nach unten auf den Schamotträger unter die Wärmelampe gelegt und dort je nach Größe der Arbeit zwischen 20 und 40 Minuten getrocknet. **Hinweis:** Eine längere Trockenzeit hat keinen negativen Einfluss auf die Farbgebung.

## Anleitung zum Einfärben eines Seitenzahns

Ausgangssituation: gefräster Zahn



Schritt	Colour Liquid	Farbauftrag	bukkal	okklusal
1	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	<b>A3 Prettau®</b> Aquarell Colour Liquid	1x		
4	<b>Cervical A</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 2x 3x bukkal okklusal		
5	<b>Incisal blue</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	<b>Incisal grey</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	<b>Incisal violet</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	<b>Orange 1</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	<b>Brown 2</b> Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

**Trocknen:** Nach dem Einfärbeprozess werden die Arbeiten mit der Kaufläche nach unten auf den Schamotträger unter die Wärmelampe gelegt und dort je nach Größe der Arbeit zwischen 20 und 40 Minuten getrocknet. **Hinweis:** Eine längere Trockenzeit hat keinen negativen Einfluss auf die Farbgebung.

## Das gesamte Colour Liquid Prettau® Aquarell Sortiment umfasst:



### Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4

auf Wasserbasis mit Bio-Pigmenten, zum säurefreien Einfärben von Prettau® Grünzirkon mit Pinseltechnik

20 ml oder 50 ml im Set oder einzeln erhältlich



### Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D

auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Interdental- und Zervikalbereiche sowie okklusale Fissuren

20 ml erhältlich, geeignet für Prettau® Zirkon



### Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensiv

geeignet für Prettau® Zirkon

20 ml im Set oder einzeln erhältlich!

- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue A:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Zahnfleischbereiche (hellrosa)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue B:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Zahnfleischbereiche (rosa)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue C:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Zahnfleischbereiche (violettrosa)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Tiefenwirkung im Inzisalbereich (Fischmaul) und transparente bläuliche Leisten
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für transparente Bereiche zum Absenken von Grauwerten
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Inzisalbereiche
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Fissuren im Okklusalbereich
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2:** auf Wasserbasis, zum säurefreien Einfärben mit Bio-Pigmenten für Fissuren im Okklusalbereich



### Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment

10 ml im Set oder einzeln erhältlich

- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment A1-D4:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Tissue:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Prettau® Aquarell Tissue A-C
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Orange:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1 und Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Brown:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Grey:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Violet:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Blue:** ausbrennbare Farbpigmente zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue



### Colour Liquid Waterbased Verdünner

auf Wasserbasis, zum Verdünnen und Aufhellen aller Colour Liquid Waterbased, Colour Liquid Prettau® Aquarell sowie Cervical- und Intensivtöne Prettau® Aquarell

À 100 ml



### Colour Liquid Waterbased Stabilisator

Auf Wasserbasis, zum Homogenisieren aller Colour Liquid Waterbased, Colour Liquid Prettau® Aquarell sowie Cervical- und Intensivtöne Prettau® Aquarell und Korrektur der Färbeergebnisse (Hinzugabe von 5% Stabilisator)

À 100 ml